

HORDOZHATÓ MASSZÁZSÁGY

- 3 ZÓNÁS ALUMÍNIUM -
- Használati Útmutató -

1. TERMÉK BEMUTATÁS

A hordozható 3 zónás masszázsgy kiválóan alkalmas a szalon- és masször munkához. Könnyen hordozható, tisztítható és strapabíró.

- Max. teherbírás: 120kg


Méret (HxSxM): 183x62x65cm

Súly (kg): 15,2kg

Szín: Fehér

(1) Tartozékok

- Masszázsgy
- Papírlapedő tartó
- Fejtámasztó rúd (2db)
- Kivehető fejpárna

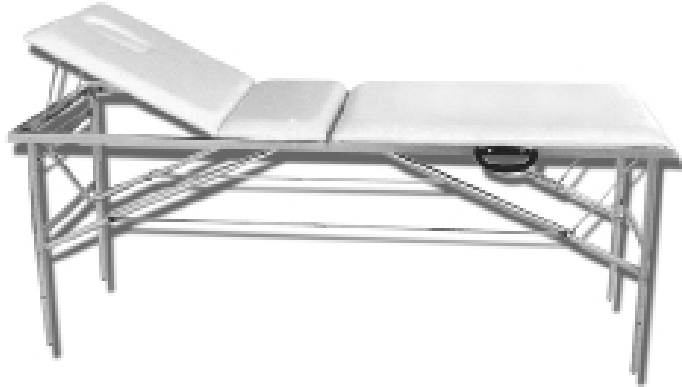

2. HASZNÁLAT

Óvatosan csomagolja ki a berendezést. Ügyeljen arra a kinyitása során, hogy a masszázsgy Hordozófüle a felé nézzen, valamint a merevítő fémhuzalok a berendezés alján, a lábak között és ne a kábakon kívül helyezkedjenek el.

(1) Kinyitás

[1.] Lépés



[2.] Lépés



[Megjegyzés]


A masszörágy magassága 3 különböző méretben változtatható.

- Max. Emelés: 10cm

A magasság megváltoztatásához Nyomja be a masszörágy lábán található gombot, majd egyidejűleg húzza ki a lábat a kívánt magassáig.

FONTOS, hogy mindegyik láb azonos magasságra legyen beállítva, különben balesetet és személyi kárt is okozhat a nem megfelelően beállított magasság.

[3.] Lépés

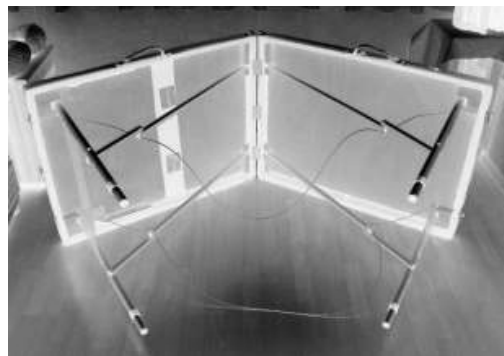

[4.] Lépés

Szerelje fel a berendezés fejrésze alá a Fejtámasztó rudakat. Csavarja ki a fejrész alatt található csavarokat. Helyezze a rudakat a tartóvázon található nyílásaikba, majd rögzítse őket csavarral a felnyitható fejrészhez.

Most már tetszőlegesen tudja szabályozni a fejrész magasságát.

[5.] Lépés

Miután teljesen kihajtotta a berendezés lábait és felszerelte a Fejtámasztó rudakat, emelje fel a masszázsgyot és állítsa a lábaira. Ügyeljen arra hogy a fordítás közben fogja a masszázsgy fejrészét, hogy a művelet közben ne nyitódjon ki, ill. arra is, hogy a művelet közben ne érjenek le a berendezés lábai, mert megsérülhetnek, elgörbülhetnek.

(2) Összecsukás

A berendezés összecsukása fordított sorrendben történik, mint a (1) Kinyitás pontban leírtakban. Az összecsukás során nem szükséges eltávolítani a Fejtámasztó rudakat lásd. [4.] Lépés.

3. BIZTONSÁG ÉS KARBANTARTÁS

1. A berendezést mindig stabil, egyenletes felületen helyezze el.
2. A berendezés puha borítása és fém részei nedves puha ruhával tisztíthatóak dörzsölés nélkül. NE használjon oldószer tartalmú tisztítószeret! Törölje szárazra a berendezést tisztítást követően.
3. Hosszabb tárolás esetén takarja le a berendezést száraz ruhával, vagy fóliával.
4. Minden esetben kérje ki szakember segítségét a berendezés javításához!
5. Ügyeljen arra, hogy a vendég először a masszázsgy közepére üljön, majd ezt követően feküdjön rá a berendezésre. Ellenkező esetben baleset, személyi sérülés is bekövetkezhet.

FIGYELEM!

Az Akcióban szereplő szalonbútorok esetében, a rozsdásodás NEM képezi a Jótállás részét, mivel küllemhibás és értékcsökkent áruk vesznek részt az Akcióban! További részletekért keresse fel a termék forgalmazóját.

Importőr: Elite Cosmetix Kft.; 1085 Budapest, József Krt. 44.